

ASK®

產品編號：08U110 (1 測試/盒)

寵物驗尿卡四合一檢測

Pets Urine Test Card 4 in 1

效能：檢測尿液中葡萄糖(Glucose)、蛋白質(Protein)、酸鹼值(pH)、潛血(Occult blood)等項目。

臨床應用與原理

寵物驗尿卡是一張卡片上包含顏色比對區及驗尿區，可用於檢測尿液中之葡萄糖，蛋白質，酸鹼值及潛血。

尿液是寵物體內因新陳代謝，每天在腎臟形成，流經膀胱，尿道排出體外。它顯示每天寵物體的生理訊號，正常情況下，糖尿、蛋白尿、血尿等是偵測不到的。醫學上，正規檢驗試劑測出時，表示異常。建議用不同的方法，進行對照檢驗。方便又簡單的寵物驗尿卡是讀取寵物身體生理訊號第一先知工具。

寵物驗尿卡反應原理如下：

1. 葡萄糖：本測試是依據雙重酵素 (glucose oxidase 和 peroxidase) 終點呈色法進行檢測。
2. 蛋白質：本測試是依據蛋白質 + 指示劑 (tertabromphenol blue) 進行檢測。
3. 酸鹼值：本測試是依據雙重指示劑 (methyl red 和 bromthymol blue) 進行檢測。
4. 潛血：本測試是依據血紅素之 peroxidase-like 活性進行檢測。

保存及穩定性

1. 保存於 2-35°C。
2. 拆封前，有效期內皆可使用。

檢體收集及準備

1. 用清潔，乾淨的容器收集新鮮的尿液，不必離心，在測試前將尿液混合均勻，並於一小時內測試完畢。若於一小時內無法完成測試，須將檢體儘快置於 2-8°C 冷藏，測試前須確定已回到室溫。
2. 未保存之檢體置於室溫過久會導致細菌分裂增生改變酸鹼值。酸鹼值偏鹼可導致蛋白質的偽陽性。尿液中若存有葡萄糖，被細菌代謝後會使得酸鹼值減少。
3. 請自備乾淨的衛生紙，擦拭沾取尿液。
4. 請自備筆供檢驗結果的打勾記錄。

材料需求：寵物驗尿卡四合一檢測、滴管、尿液收集杯、衛生紙、計時器及筆。

注意事項

1. 請注意本驗尿卡有效期限。逾期驗尿卡失效。鋁箔拆封 30 分鐘後，驗尿卡會回潮導致失效，都應該丟棄不可使用。
2. 月經期間，檢驗受干擾，勿使用本試劑。
3. 污染尿液不能檢驗。新鮮尿液才具有檢驗價值。
4. 寵物驗尿卡四合一檢測單卡包。拆封使用後，不可重複使用。
5. 本驗尿卡包內附有乾燥用之乾燥紙片。
6. 色弱或色盲之使用者，請找正常人協助判讀。
7. 尿液之顏色易受生理狀況或藥物影響產生異常顏色。此時，檢驗結果易出現非典型顏色反應，導致結果不易判定。若有疑問，請洽獸醫師諮詢。

操作方法

1. 用乾淨的收集杯收集新鮮的尿液。
2. 將驗尿卡自鋁箔袋內取出，勿碰觸驗尿區。
3. 將驗尿卡之驗尿區全部滴上新鮮尿液或浸入新鮮尿液中 1-2 秒鐘，並立即取出，避免將試劑溶出。
4. 將驗尿卡驗尿區之邊緣沿著免洗杯的口壁處滑過，去掉多餘尿液。
5. 請保持驗尿卡水平，置於衛生紙上，避免手沾到尿液。開始計時。驗尿區待 60 秒呈色後，請平行左移顏色比對，在最相同顏色區，用筆打勾記錄。全部記錄完成後，沾有尿液驗尿區可以剪除。
6. 應在 1~2 分鐘內讀完結果，2 分鐘後驗尿區的任何變化均沒有診斷價值。

結果比對及判讀說明

結果代碼	正常	異常					
		①	②	③	④	⑤	⑥
葡萄糖 mg/dL	陰性 不含	微量 100±	輕量 250±	低量 500±	中量 1000±	高量 2000±	---
蛋白質 mg/dL	陰性 不含	微量 15±	輕量 30±	低量 100±	中量 300±	高量 2000±	---
酸鹼值	正常 5.0±	正常 6.0±	正常 6.5±	正常 7.0±	正常 7.5±	異常 8.0±	異常 8.5±
潛血 ca cells/μL	陰性 不含	微量 10±	微量 10±	低量 25±	中量 80±	高量 200±	---

異常結果說明：一旦用寵物驗尿卡四合一測試，測出異常結果，就值得注意。請儘快與獸醫師聯絡。

結果參考值

動物	犬	貓
尿量(公升/天)	0.04-2	0.075-0.2
葡萄糖	陰性	陰性
蛋白質	陰性	陰性
酸鹼值	5.2 - 6.8	6 - 7
潛血	陰性	陰性

製造廠名稱：東耀生物科技有限公司

製造廠住址：桃園縣楊梅鎮金山街 126 號

電話：886-3-4750316 傳真：886-3-4784912

台北公司電話：886-2-23661753 傳真：886-2-23672680

Web：www.askbiotech.com.tw

E-mail：ask001@ms28.hinet.net