

## 東耀驗尿卡

ASK<sup>®</sup> U4T

目的：一張卡片上包含顏色比對區及驗尿區，可用於檢測尿液中之葡萄糖，蛋白質，酸鹼值及潛血。

使用方法：① 取中段新鮮尿液倒入杯子，② 將驗尿卡驗尿區浸入新鮮尿液 1-2 秒鐘，③ 利用衛生紙將多餘尿液吸乾，④ 60 秒呈色後，並於 2 分鐘內平行比對記錄。  
請參閱試劑盒之操作圖示。

結果說明：

驗尿區	結 果 說 明
葡萄糖	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正常：驗尿卡測試為陰性，尿液中未檢測出葡萄糖。</li> <li>2. 異常：驗尿卡測試為陽性，尿液中檢測出葡萄糖。俗稱糖尿。</li> <li>3. 糖尿多發生在糖尿病的病人，也可見於其他內分泌失調的病人、其他腦病變的病人、燒燙傷病人、感染病人、肥胖、心肌梗塞、尿毒病人、肝病病人、懷孕、藥物等原因；</li> <li>4. 偶而，多吃甜食後也有可能發生短暫性尿糖的情形。</li> </ol>
蛋白質	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正常：驗尿卡測試為陰性，尿液中未檢測出蛋白質。</li> <li>2. 異常：驗尿卡測試為陽性，尿液中檢測出蛋白質。俗稱蛋白尿。</li> <li>3. 蛋白尿的出現可由其出現的期間而分為間歇性或持續性蛋白尿： <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 間歇性蛋白尿：一般屬於良性，多與腎臟病無關，如暫時性蛋白尿偶會發生在孕婦（但是，懷孕期間子癇症時也會發生蛋白尿，因此懷孕期間的蛋白尿必須特別注意詳查其發生原因）。偶會出現在發燒病人、激烈運動之後，或情緒壓力的個人。</li> <li>3.2 持續性蛋白尿：多由病變所引起，必須詳察其病變的原因。</li> </ol> </li> </ol>
酸鹼值	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正常值約在 4.5 - 8.0 之間。</li> <li>2. 多吃肉類及高蛋白食物、藥物或抗生素會使尿偏向酸性。</li> <li>3. 素食者或多攝取蔬菜、水果較多者會使尿偏向鹼性，有時醫師在治療尿路感染時，會使用重碳酸鈉等藥物使尿偏向鹼性。</li> </ol>
潛血	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正常：驗尿卡測試為陰性，尿液中未檢測出潛血。</li> <li>2. 異常：驗尿卡測試為陽性，尿液中檢測出潛血〈血尿、血色素及肌紅蛋白〉。</li> <li>3. 血尿最常見於腎結石，其他如腎絲球腎炎、腎臟或泌尿道感染、腫瘤等，都可能出現血尿。</li> <li>4. 血色素尿多因血管內溶血而產生血紅素血症，如蠶豆症或紅血球自體抗體疾病。</li> <li>5. 肌紅蛋白則源自肌肉纖維的破壞。</li> </ol>

參考資料：<http://web2.cc.nctu.edu.tw/~hcscl/hospital/uti/uti0.html>

製造廠名稱/地址：東耀生物科技有限公司/桃園縣楊梅鎮金山街 126 號

電話：886-3-4750316 傳真：886-3-4784912

台北公司電話：886-2-23661753 傳真：886-2-23672680

網址：[WWW.ASKBIOTECH.COM.TW](http://WWW.ASKBIOTECH.COM.TW) 電子信箱：[tonyar@askbiotech.com.tw](mailto:tonyar@askbiotech.com.tw)