

## 東耀酮類驗尿卡

ASK<sup>®</sup> UKT

目的：一張卡片上包含顏色比對區及驗尿區，可用於檢測尿液中之酮類。測試結果提供有關脂肪代謝的相關資料，

使用方法：① 取中段新鮮尿液倒入杯子，② 將驗尿卡驗尿區浸入新鮮尿液 1-2 秒鐘，  
③ 利用衛生紙將多餘尿液吸乾，④ 60 秒呈色後，並於 2 分鐘內平行比對記錄。請參閱試劑盒之操作圖示。

結果說明：

驗尿區	結 果 說 明
酮類	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 產生原因：當體內糖類代謝出現障礙，尤其是酸中毒時，身體會優先分解脂肪作為能量來源，過多的脂肪不完全分解即會形成酮類。</li><li>2. 正常：驗尿卡測試為陰性，尿液中未檢測出酮類。</li><li>3. 異常：驗尿卡測試為陽性，尿液中檢測出酮類。俗稱尿酮。</li><li>4. 糖尿病、肌餓、嘔吐、外科手術後、腸胃障礙等尿酮均會升高。</li></ol>

參考資料：尿液常規檢查 --- 作者：長庚醫院臨床病理科主任 孫建峰醫師，鏡檢組  
組長 趙少文醫檢師。

製造廠名稱/地址：東耀生物科技有限公司/桃園縣楊梅鎮金山街 126 號

電話：886-3-4750316 傳真：886-3-4784912

台北公司電話：886-2-23661753 傳真：886-2-23672680

網址：www.askbiotech.com.tw 電子信箱：[tonyar@askbiotech.com.tw](mailto:tonyar@askbiotech.com.tw)