

東耀微白蛋白驗尿卡

ASK[®] UMT

目的：一張卡片上包含顏色比對區及驗尿區。驗尿區包含二種檢測：測試區可檢測尿液中微量白蛋白(microalbumin)；參考區可檢測尿液中肌酸酐(Creatinine)為對照(control)。測試結果可提供有關腎臟早期損傷的相關資料。

使用方法：① 取中段新鮮尿液倒入杯子，② 將驗尿卡驗尿區浸入新鮮尿液 1-2 秒鐘，③ 利用衛生紙將多餘尿液吸乾，④ 60 秒呈色後，並於 2 分鐘內平行比對記錄。請參閱試劑盒之操作圖示。

結果說明：

驗尿區	結 果 說 明
白蛋白 及 肌酸酐	1. 產生原因：高血壓的早期血管內皮損傷或糖尿病的早期腎絲球通透性加大或早期損傷。 2. 正常：驗尿卡測試為正常，尿液中不含或含微量白蛋白，低於正常值。 3. 異常：驗尿卡測試為異常，尿液中含白蛋白，高於正常值。 俗稱微白蛋白尿。

參考資料：1. Levey AS, Coresh J, Balk E, et al. National kidney function practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, signification. Ann Intern Med. 139:137-147; 2003.

2. Position statement: Diabetic Nephropathy. Diabetes Care 20:S24-S27; 1997.

製造廠名稱/地址：東耀生物科技有限公司/桃園縣楊梅鎮金山街 126 號

電話：886-3-4750316 傳真：886-3-4784912

台北公司電話：886-2-23661753 傳真：886-2-23672680

網址：www.askbiotech.com.tw 電子信箱：tonyar@askbiotech.com.tw